






SELBSTTEST-GEBRAUCHSANWEISUNG (FLOWFLEX)

1 


- Tupfer ca. 2,5 Zentimeter in ein Nasenloch einführen
- Das Stäbchen 5 Mal drehen, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
- Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

2 

- Röhrchen mit Pufferlösung aufschrauben, ohne es zu drücken
- Das Stäbchen einführen und 30 Sekunden umrühren
- Röhrchen zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens 5 Mal drehen
- Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Röhrchen spritzt!

3 

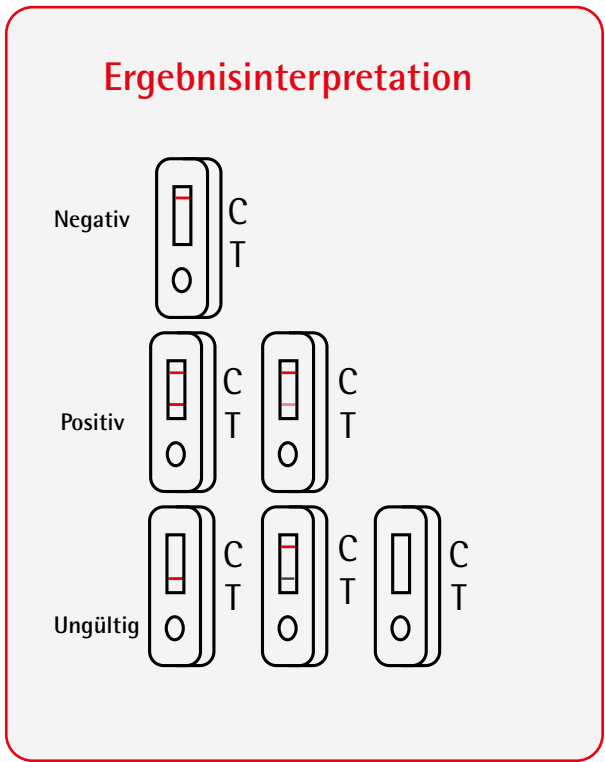
- Stäbchen entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken
- Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen
- Röhrchen wirbeln und schütteln

4 

- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
- Kappe von der Tropferspitze abdrehen
- Röhrchen vorsichtig zusammendrücken und 4 Tropfen auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)

5 

- 15 Minuten warten
- Das Ergebnis ablesen

6 

Ergebnisinterpretation

Negativ: C (red line), T (no line)

Positiv: C (red line), T (red line)

Ungültig: C (red line), T (no line) OR C (no line), T (red line) OR C (no line), T (no line)

TEST-REGISTRIERUNG

Hier den Selbsttest „Flowflex“ registrieren:

www.vorarlberg.at/corornatest

Der registrierte Selbsttest bietet eine Zutrittsberechtigung für 24 Stunden.



Röhrchen/
Extraktionspuffer



Stäbchen/Tupfer



Testkassette



Weitere Informationen zur COVID-19 Erkrankung erhalten Sie unter:

Land Vorarlberg: www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet

Bundesministerium: www.sozialministerium.at